

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Active Urinuppsamlingspåse

Diskret helhetslösning med urinpåse, slang och fixeringsband



Produktinformation

Användning

Conveen Active urinuppsamlingspåse används tillsammans med urindroppssamlare vid lätt till måttlig urininkontinens.

Det är en diskret och säker lösning för män som vill ha komfort även när de är aktiva.

Urinuppsamlingspåse, slang och fixeringsband är integrerade i en totallösning som är färdig att använda direkt. Påsens unika design gör att den inte liknar någon befintlig urinuppsamlingspåse.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Påsen på benet är avsedd att användas när man är uppegående. Om behov finns kan man koppla på en sängpåse med större kapacitet till utloppet.

Utloppet är enkelt att hantera och kan vikas uppåt och döljas under fixeringsbandet för att vara bekväm, säker och diskret.

Fördelar

- Diskret och säker fixering på låret
- Justerbar och knickfri slang
- Integrerat och justerbart fixeringsband
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Hudvänligt non-woven material för bekväm användning
- Lös slang med fast konnektor som passar till på marknaden förekommande urindroppssamlare och om behov finns till urinkatetrar
- PVC-, latex- och ftalatfri



Funktioner

Det breda fixeringsbandet, silikonhäftan och kardborrebandet ger en behaglig, diskret och säker fixering på låret. Urinpåsens mjuka och elastiska fixeringsband gör att påsen känns behaglig mot huden. Urinen fördelas i flera kamrar för diskretion.

Conveen Active är försedd med backventil mellan påse och slang. Påsen rymmer 250 ml och är tömbar.

Knickfri och tömbar

Slangen är kort, justerbar och knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt även om slangen böjs kraftigt. Påsen ska bytas enligt gällande riktlinjer och rekommendationer. Konnektorn passar till marknadens förekommande urindroppssamlare och om behov finns till urinkatetrar.

Produktsortiment

Conveen Active	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp	Antal/tfp	Coloplast Art nr
Benpåse	Ja	Ja	250	7	10	120	255010

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Active ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är tre år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

