



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus

Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriter, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 60 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 60 sek

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården. Även lämplig för privat bruk.	
Produktegenskaper	Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas God upplösande effekt på t.ex. spill av blod	
Bruksanvisning	Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil. Gör så här: 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider) 3. Lämna ytan att lufttorka	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Isopropanol	45vol% Med tensid

pH konzentrat

8.5 svagt alkaliskt

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.

Tillverkningsland

SVERIGE

**Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.****Artikelnr.****GTIN****GTIN (krt)**

12 x 1 l

468-12

7331964004685

7331964904688

3 x 5 l

469-3

7331964004692

7331964904695

24 x 300 ml

461-24

7331964004616

7331964904619

**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.